


Silk'n Tightra

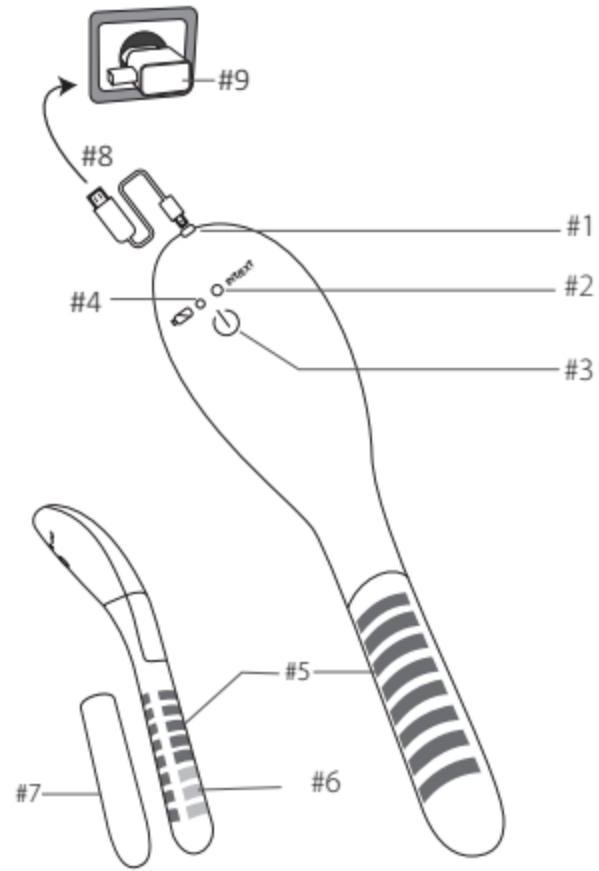

1. Įspėjimai ir kontraindikacijos



Informacija, įspėjanti apie galimą pavojų, problemą, kitą nemalonią situaciją, kuri gali pasireikšti prietaiso naudojimo metu.



Su elektra ir saugumu susiję įspėjimai

- Prietaisas, USB kabelis ir adapteris turi būti sausi.
- Nenaudokite prietaiso vonioje ir duše.
- Prieš jungdami prietaisą prie maitinimo šaltinio, patikrinkite, ar jūsų rankos sausos.
- Nenaudokite adapterio, jeigu jo kabelis arba kištukas sugadintas, taip pat tuo atveju, jeigu jis neveikia tinkamai arba buvo įmerktas į vandenį. Tokiu atveju nedelsdami atjunkite adapterį. Priešingu atveju galimas elektros šokas!
- Netraukite adapterio iš rozetės, laikydami už kabelio. Traukite, laikydami adapterį.
- Nenaudokite prietaiso aplinkoje, kurioje pasireiškia sprogimo rizika. Laikykite prietaisą toliau nuo atviros liepsnos, įkaitusių paviršių.
- Laikykite adapterį pasiekiamoje vietoje, kad skubiu atveju galėtumėte ištraukti iš lizdo.
- Įkrovę, atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio.
- Laikykite adapterio kabelį taip, kad nebūtų jokio užkliuvimo pavojaus.
- Nenaudokite, jeigu nėra gamintojo nurodytų dalių ar priedų, ir tuo atveju, jeigu prietaisas sugedo, veikia netinkamai. Tokiu atveju susisieki su Klientų aptarnavimo skyriumi.
- Pasirūpinkite, kad procedūros metu nebūtų jokių šiurkščių paviršių, aštrių kraštų, išsikišimų, kurie keltų susižalojimo pavojų.
- Nemodifikuokite, neardykite, neremontuokite prietaiso patys. Viduje yra pavojingų elektrinių komponentų, kurie kelia didelį susižalojimo pavojų. Tokiu atveju anuliuojama garantija.
- Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, susižalojimas, kurie pasireiškė dėl netinkamo arba neteisingo naudojimo.
- Neleiskite vaikams žaisti su pakuote. Jie gali susižaloti, užspringti mažomis dalimis, uždusti.
- Prietaiso tarnavimo trukmei pasibaigus, pristatykite jį ir visas jo dalis į elektrinių prietaisų surinkimo punktą. Žr. 15 skyrių „Šalinimas“.



Kontraindikacijos

Šio prietaiso ir jo dalių negali naudoti: vaikai, translytės moterys, riboto fizinio, jutiminio ir psichologinio veiksnio suaugusieji bei tie, kuriems trūksta patirties ar žinių, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir tie, kurie nesupranta susijusio pavojaus.

Nenaudokite šio prietaiso, jeigu:







- Esate nėščia arba žindote.
- Per pastaruosius 12 mėnesių jums buvo atlikta vaginalinė arba dubens operacija.
- Turite širdies stimuliatorių ar vidinį defibriliatorių, kitą aktyvų elektrinį implantą.
- Gydomoje vietoje turite implantą.
- Sergate sunkiomis gretutinėmis ligomis, pvz., širdies veiklos sutrikimu, jutimo sutrikimais, epilepsija, nekontroliuojama hipertenzija, kepenų ir inkstų ligomis.
- Sirgote odos vėžiu arba genitalijų srities vėžiu, sergate kito tipo vėžiu, turite ikivėžinių apgamų.
- Jūsų imuninė sistema sutrikusi dėl imuninę sistemą slopinančių ligų, pvz., AIDS, ŽIV, arba dėl imuninę sistemą slopinančių vaistų vartojimo.
- Kenčiate nuo sunkiai kontroliuojamų endokrininių sutrikimų, pvz., diabeto, skydliaukės veiklos sutrikimų.
- Gydomoje vietoje pasireiškia opos, psoriazė, egzema, bėrimai, yra atvirų įtrūkimų, įbrėžimų, kitokių pažeidimų.
- Prieš 2-3 savaites buvote gydyta šviesos, lazerio, radijo bangų ar kitais prietaisais arba prieš 6-12 savaičių jums buvo atlikta abliacinė frakcinė procedūra lazeriniu (priklausomai nuo procedūros intensyvumo), išskyrus specialias rekomendacijas.
- Prieš 6 mėnesius naudojote izotretinoiną („Accutane“).
- Sergate lytiškai plintančia liga.
- Sergate šlapimo takų infekcija, dubens uždegimine liga.
- Per pastaruosius 3 mėnesius jums buvo taikoma radiacijos terapija arba chemoterapija.
- Negalite tinkamai jausti šilumos dėl ligos ar kitų sveikatos problemų.
- Šiuo metu jums menstruacijos.
- Jums pasireiškia (-ė) kita liga, dėl kurios, gydytojo nuomone, ši procedūra būtų nesaugi.


Prieš naudodami prietaisą, pasitarkite su gydytoju, jeigu:

- Per pastaruosius 2 metus jūsų PAP tepinėlio ar dubens tyrimų rezultatai pasižymėjo nukrypimais.

- Gydomoje vietoje jums pasireiškia (-ė) ligos, kurias stimuliuoja karštis, pvz., pasikartojanti pūslelinė. Tokiu atveju prietaisą galite naudoti tik po profilaktinio režimo.
- Jums atlikta vaginalinė operacija arba sergate makšties prolapsu.
- Sergate odos ligomis, pasireiškia nenormalus žaizdų gijimas, turite labai sausą ir jautrią odą.
- Jums pasireiškia koaguliopatija arba vartojate antikoaguliantus, išskyrus mažomis dozėmis vartojamą aspiriną.
- Turite implantuotą tinklėlį.
- Turite implantuotą metalinę kontracepcijos sistemą.
- Per pastarąsias dvi savaites vartojote vaistus, vaistažoles, maistą, papildus, vitaminus, kurie turi įtakos gijimui.
- Jums pasireiškia gimdos prolapsas, iškritimas arba nusileidimas.
- Per pastaruosius 6 mėnesius gydytojas yra paskyręs vaistų odos ligos gydymui.

2. Ženkliai ir simboliai

	Svarbi informacija apie prietaiso naudojimą arba priežiūrą.
	Šiuo simboliu paženklinėti gaminiai atitinka ES direktyvų reikalavimus.
IP23	Prietaisas apsaugotas nuo purškiamo vandens, kai yra pakreiptas 60° kampu.
	Apsaugos nuo elektros šoko laipsnis: BF tipo taikoma dalis.
	Naudojant greta įrenginių, galimi trikdžiai.
	Nešalinkite drauge su buitinėmis atliekomis. WEEE direktyvoje pateikti reikalavimai pristatyti elektrinius prietaisus (įskaitant visus priedus ir dalis) į elektrinių prietaisų surinkimo punktus.
	Vadovaukitės Vartotojo instrukcija.
Li-ion	Ličio jonų baterija.

 Šis prietaisas negali būti naudojamas šalia degių anestetinių mišinių su oru, deguonimi arba azoto oksidu.

3. Saugumo informacija

Naudojant „Silk'n“ prietaisą, svarbiausia yra saugumas. „Silk'n Tightra“ pasižymi šiomis saugumą užtikrinančiomis savybėmis“

- **Šilumos stabilizatorius:** siekiant išvengti perkaitinimo, kiekviename iš 16 elektrodų (nr. 5, nr. 6) yra integruotas šilumos stabilizatorius. Aptikus odos temperatūros padidėjimą, stabilizatorius automatiškai sustabdo šilumos skleidimą. Kai odos temperatūra pakankamai sumažėja, šilumos skleidimas atnaujinamas.
- **Lietimo jutiklis:** lietimui jutiklis užtikrina, kad radijo dažnių energija per elektrodus (nr. 5, nr. 6) tekėtų tik tada, kai yra tinkamas sąlytis su oda.
- **Judesio jutiklis:** jeigu prietaisas naudojamas išoriniu režimu, energija skleidžiama tik tada, kai jis vedamas per odą.
- **Automatinis išsijungimas:** ši saugumo funkcija aktyvuojama 3 atvejais:
 - ✓ Baigėte 20 minučių procedūrą. Pajusite 1 suviravimą.
 - ✓ Prietaisas neturėjo sąlyčio su oda ilgiau nei 2 minutes. Pajusite 1 suviravimą.
 - ✓ Baterijos energijos nepakanka 20 minučių procedūrai.


4. Prietaiso valdymo priemonės ir nustatymai



4.1 Prietaiso veikimo režimai

Prietaisas naudojamas 2 režimais: vidiniu ir išoriniu.

- Vidinis režimas: šis režimas yra skirtas makšties audinio ir raumenų tvirtinimui, siekiant padidinti lytinį aktyvumą. Drauge su Kėgelio pratimais vidinis režimas padeda sutvirtinti dubens dugno raumenis, padidinti raumenų tonusą. Vidinis režimas pasižymi 3 energijos lygiais: žemu, reguliaru ir aukštu.
- Išorinis režimas: šis režimas yra skirtas išorinio vulvos odos audinio sutvirtinimui, siekiant pagerinti makšties išvaizdą. Naudojamas 1 energijos lygis.

4.2 Prietaiso valdymo priemonės

Valdymo priemonė	Režimas	Veiksmas	Paaiškinimas
Valdymo mygtukas (nr. 3) 	Vidinis	Ilgas paspaudimas	Prietaisas aktyvuojamas (vidinis režimas, žemas energijos lygis). Režimo indikatorius (nr. 2) blyksi žalia spalva; prietaisas 1 kartą suviruoja.
		Trumpas	Reguliarus

		spustelėjimas	energijos lygis
		Trumpas spustelėjimas dar kartą	Aukštas energijos lygis
	Išorinis	Trumpas spustelėjimas dar kartą	1 energijos lygis
	Abu režimai	Ilgas paspaudimas	Prietaisas išsijungia; 1 kartą suvibruoja.
Režimo indikatorius (nr. 2) 	Vidinis	Žalia (lėtas blykčiojimas)	Žemas energijos lygis
		Žalia (greitas blykčiojimas)	Reguliarus energijos lygis
		Žalia (šviečia)	Aukštas energijos lygis
	Išorinis	Balta (šviečia)	1 energijos lygis
	Abu režimai	Žalia ir balta (žybsi pakaitomis)	Sistemos klaida. Prietaisas automatiškai išsijungs.
	Baterijos indikatorius (nr. 4) 	-	Žalia (blykčioja)
Žalia (šviečia)			Prietaisas įkrautas
Abu režimai		Oranžinė (blykčioja) Oranžinė (šviečia)	Baterija išsikrauna Baterija išsikrovė

4.3 Įkrovimo režimai ir energijos lygiai

- Vidinis režimas: įjungus prietaisą, šis nustatymas yra numatytasis.
- Išorinis režimas: norėdami pereiti prie išorinio režimo, prieš pradėdami procedūrą, 3 kartus trumpai spustelėkite valdymo mygtuką (nr. 3). Tai galite padaryti per pirmąją minutę po prietaiso įjungimo.
- Režimo pakeitimas naudojimo metu: jeigu naudojate prietaisą, išjunkite, vėl įjunkite jį ir tada pasirinkite pageidaujamą režimą.
- Energijos lygio pakeitimas naudojimo metu: norėdami pakeisti vidinio režimo energijos lygį naudojimo metu, trumpai spustelėkite valdymo mygtuką (nr. 3). Kaskart spustelėjus, pasirenkamas vienas iš 3 energijos lygių.

4.4 Prietaiso įkrovimas

Prieš naudodami pirmą kartą, įkraukite prietaisą. Pirmasis įkrovimas trunka maždaug 6 valandas.

- Įkiškite USB kabelį (nr. 8) į prietaisą. Kitą kabelio galą įkiškite į USB adapterį (nr. 9). Įkiškite adapterį į maitinimo šaltinį. Baterijos ir veikimo režimo indikatoriai (nr. 4, nr. 2) įsijungia ir vėl išsijungia. Tada baterijos indikatorius (nr. 4) pradeda blykčioti žalia spalva.
- Po 20 minučių procedūros pilnai įkraukite prietaisą. Prieš pradėdami kitą procedūrą, patikrinkite baterijos įkrovos lygį.

5. Susipažinkite su „Silk'n Tightra“

5.1 Sudėtis

- „Silk'n Tightra“ prietaisas
- USB kabelis ir adapteris*
- Vartotojo instrukcija
- Garantijos kortelė
- Grožio dėklas

* Priklauso nuo pasirinktos komplektacijos.

5.2 Prietaiso dalys

Prietaisą sudaro pakartotinai įkraunama baterija. Baterija kraunama, naudojant standartinį USB kabelį (nr. 8). Žr. (i) psl. pateiktą paveikslėlį:

- USB lizdas (nr. 1)
- Veikimo režimo indikatorius (nr. 2)
- Valdymo mygtukas (nr. 3)
- Baterijos indikatorius (nr. 4)
- Elektrodai – vidinis režimas (nr. 5)
- Elektrodai – išorinis režimas (nr. 6)
- Apsauginis dangtelis (nr. 7)
- USB kabelis (nr. 8)
- USB adapteris (nr. 9).

5.3 Prietaiso apibūdinimas

„Silk'n Tightra“ – tai medicinos kosmetinis prietaisas, naudojantis Bi-Polar radijo dažnių energiją, kuri teka tarp elektrodų (nr. 5, nr. 6). Ši energija sutraukia ir įtempia audinį iš vidaus, tokiu būdu stiprindama raumenis ir didindama lytinį pasitenkinimą. Prietaisas taip pat naudojimas makšties išvaizdos gerinimui iš išorės.

5.4 Paskirtis

„Silk'n Tightra“ – tai elektrinis prietaisas, skirtas lytinio aktyvumo didinimui. Drauge su Kėgelio pratimais šis prietaisas padeda sustiprinti dubens dugno raumenis, pagerinti raumenų tonusą.

Prietaisas skirtas naudojimui namuose. Jis nėra tinkamas komerciniam ar terapiniam naudojimui. Naudokite prietaisą tik pagal šioje instrukcijoje nurodytą paskirtį.

5.5 Vartotojo instrukcijos perskaitymas

Ši instrukcija yra paremta Europos Sąjungoje galiojančiais įstatymais. Būdami užsienyje, turite vadovautis konkrečioje šalyje taikomais įstatymais.

Prieš naudodami pirmą kartą, atidžiai perskaitykite visą Vartotojo instrukciją. Pasilikite ją ateičiai. Rekomenduojame instrukcijas skaityti prieš kiekvieną procedūrą.

6. Ko tikėtis, naudojant „Silk'n Tightra“?

Procedūros metu normalu:

- **Jausti šilumą:** tiek vidinio, tiek išorinio režimo atveju.
- **Odos paraudimas arba nedidelis patinimas:** išorinio režimo atveju tai pasireiškia aplink makštį. Reakcija neturėtų trukti ilgiau nei 24 valandas.

 Šių reakcijų atveju rekomenduojame patepti odą alijošiaus geliu.

- **Trumpa vibracija:** procedūros metu kas kelias minutes jausite vibraciją. Tai normalu ir reiškia, kad prietaisas veikia.
- **Trumpalaikis šlapimo nelaikymas:** naudojant vidinį režimą, kartais pasireiškia poreikis dažniau šlapintis. Nesijaudinkite, tai praeis per kelias dienas. Šlapimo nelaikymas mažės, o jūs pastebėsite pagerėjimą.



Nebenaudokite prietaiso, jeigu oda stipriai parausta, atsiranda pūslelių ar nudegimų.



Nebenaudokite prietaiso, jeigu jaučiate skausmą, oda arba prietaisas pernelyg daug įkaista.

7. Galimas šalutinis poveikis

Jeigu prietaisas naudojamas pagal instrukcijas, šalutinis poveikis ir susijusios komplikacijos nėra dažnos. Vis dėlto kiekviena kosmetinė procedūra, įskaitant atliekamas namuose, pasižymi tam tikra rizika. Dėl šios priežasties svarbu, kad suprastumėte riziką ir komplikacijas, susijusias su namų naudojimui skirtomis sistemomis.

<p>Nedidelis diskomfortas (vidinis/išorinis režimas)</p> <p>Kai kuriems vartotojams naudojimo metu pasireiškia nedidelis diskomfortas. Dažniausiai jaučiamas odos dilgčiojimas. Dilgčiojimas gali išlikti ir po procedūros.</p>	<p>Rekomendacija: Nustatykite žemesnį energijos lygį. Palaukite, kol diskomfortas praeis. Tada pakartokite procedūrą.</p>
<p>Pernelyg didelė šiluma (vidinis/išorinis režimas)</p> <p>Jeigu jaučiate skausmą, didelį diskomfortą, sumažinkite energijos lygį. Palaukite, kol jausitės gerai.</p>	<p>Rekomendacija: Nustatykite žemesnį energijos lygį. Palaukite, kol diskomfortas praeis. Tada pakartokite procedūrą.</p>
<p>Alerginė reakcija</p> <p>Retais atvejais po procedūros pasireiškia alerginė reakcija.</p>	<p>Rekomendacija: Nedelsdami sustabdykite procedūrą. Jeigu reakcija išlieka ilgiau nei 24 valandas, pasikonsultuokite su gydytoju.</p>
<p>Didelis paraudimas ir patinimas (Išorinis režimas)</p> <p>Retais atvejais oda aplink makštį gali parausti, patinti. Paraudimas ir patinimas turėtų praeiti per 2-5 dienas.</p>	<p>Rekomendacija: Naudokite alijošiaus gelį. Palaukite, kol šalutinis poveikis praeis. Tik tada pakartokite procedūrą. Jeigu per 5 dienas šalutinis poveikis neišnyksta, pasikonsultuokite su gydytoju.</p>
<p>Pūslelės arba nudegimai (Išorinis režimas)</p> <p>Labai retais atvejais ant odos aplink makštį atsiranda pūslelių arba nudegimų.</p>	<p>Rekomendacija: Atvėsinkite paveiktą vietą ir patepkite kremu nuo nudegimų. Palaukite, kol šalutinis poveikis praeis. Tik tada pakartokite procedūrą. Naudokite žemesnį energijos lygį. Jeigu per savaitę šalutinis poveikis neišnyksta, pasikonsultuokite su gydytoju.</p>
<p>Tepimas (vidinis režimas)</p> <p>Retais atvejais iškart po procedūros gali pasireikšti nedidelis tepimas.</p>	<p>Rekomendacija: Jeigu šalutinis poveikis trunka ilgiau nei 24 valandas, pasikonsultuokite su gydytoju.</p>

i Nedelsiant nutraukite prietaiso naudojimą, jeigu kuris nors iš minėtų šalutinių poveikių yra sunkus.

i Jeigu šalutinis poveikis neišnyksta per 2 – 3 dienas, pasikonsultuokite su gydytoju.

8. Procedūrų planas

- Kiekviena procedūra (tiek vidinio, tiek išorinio režimo) trunka 20 minučių.

- Vienu ar abiem režimais prietaisą galite naudoti du kartus per savaitę, 4-5 savaites.
- Tada palaipsniui mažinkite naudojimą iki vieno karto per savaitę, vieno karto per dvi savaites ar netgi rečiau, atsižvelgiant į konkrečius jūsų poreikius.

9. Pradėkime!

9.1 Prieš procedūrą

- Patikrinkite, ar prietaiso baterija neišsikrauna (žr. 4.4 skyrių „Prietaiso įkrovimas“).
- Prieš procedūrą nusišlapinkite.
- Patikrinkite, ar gelio galiojimo laikas nepasibaigęs.
- Prieš naudojimą, nuo elektrodų (nr. 5, nr. 6) nuimkite apsauginį dangtelį.
- Prieš naudodami, nuvalykite elektrodus (nr. 5, nr. 6) vaginaline servetėle, nusauskite švariu popieriniu rankšluosčiu.
- Odos valymui niekada nenaudokite degių skysčių, pvz., alkoholio (įskaitant kvėpalus, dezinfekavimo, kitokias priemones), acetono.
- Prieš naudojimą išsiverkite visus auskarus, kitus metalinius aksesuarus iš gydymo vietos.

9.2 Vidinis režimas

1. Nedideliu gelio kiekiu padenkite visus elektrodus (nr. 5, nr. 6). Viduje nieko netepkite.
2. Pradėkite vidinio režimo procedūrą nuo žemo energijos lygmens. Vieną kartą ilgai paspauskite valdymo mygtuką (nr. 3). Pajusite vibraciją. Prietaisas paruoštas naudojimui.



Procedūros metu maždaug kas minutę jausite vibraciją.

3. Patogiai atsigulkite.
4. Įkiškite elektrodus (nr. 5, nr. 6) į makštį tiek, kiek jums patogiu. Procedūros metu prietaisas turi būti atremtas:
 - Jeigu jūsų kojos išskėstos ant lovos, suglauskite jas tiek, kad prietaisas būtų laikomas vietoje.
 - Jeigu jūsų kojos sulenktos (pėdos ant lovos), po prietaisu padėkite pagalvėlę.
 - Taip pat galite laikyti prietaisą rankomis.

Jeigu praėjus 5 minutėms, prietaiso skleidžiama šiluma jums nekelia nepatogumų, pereikite prie reguliaraus energijos lygio, trumpai spustelėdami valdymo mygtuką (nr. 3). Norėdami nustatyti aukštą energijos lygį, trumpai paspauskite valdymo mygtuką (nr. 3) dar kartą.

5. Laikykite prietaisą tokioje padėtyje 20 minučių. Rekomenduojame ramiai gulėti, nesimuistyti. Patartina retkarčiais apsukti prietaisą, kad energija netrukdomai tekėtų per elektrodus (nr. 5, nr. 6). Po 20 minučių prietaisas automatiškai išsijungia.
6. Ištraukite prietaisą, išvalykite makšties išorėje esančią odą švariu sausu rankšluosčiu arba būtent makščiai skirtomis servetėlėmis. Tokiu būdu pašalinsite gelio likučius.


Jeigu jaučiate skausmą arba diskomfortą:

- Jeigu naudojate aukštą arba reguliarų energijos lygį, sumažinkite jį, paspausdami valdymo mygtuką (nr. 3) vieną arba du kartus. Palaukite 5 minutes, kol karštis sumažės.
- Jeigu naudojate žemą energijos lygį, ištraukite prietaisą ir palaukite, kol jausitės gerai. Tada pakartokite procedūrą.

9.3 Išorinis režimas

Prieš naudodami, nuskuskite, nuvalykite ir nusausinkite odą. Ant jos neturi likti jokių pudros, antiperspiranto ar dezodoranto pėdsakų. Pasižiūrėkite, ar oda neparaudusi, ar nėra uždegimo.

1. Nedideliu gelio kiekiu padenkite 3 sidabro spalvos elektrodus (nr. 5, nr. 6). Viduje nieko netepkite.
2. Norėdami įjungti išorinį režimą, vieną kartą ilgai paspauskite valdymo mygtuką (nr. 3), tada trumpai spustelėkite jį 3 kartus. Veikimo režimo indikatorius (nr. 2) įsižiebja balta spalva. Prietaisas paruoštas naudojimui.
3. Patogiai atsigulkite.
4. Laikydami prietaisą už pagrindo, uždėkite 3 sidabro spalvos elektrodus (nr. 5, nr. 6) ant lytinių lūpų. Trikampio forma padės nustatyti tinkamą prietaiso padėtį.

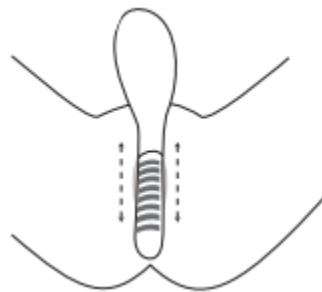

i Jeigu elektrodai (nr. 5, nr. 6) tinkamai liečiasi su oda, judindami prietaisą jausite elektrodų sklaidžiamą šilumą. Lėtai, tačiau tvirtai vedžiuokite prietaisą per odą. Jeigu nevedžiosite, Bi-Polar radijo dažnių energijos funkcija neveiks.

i Procedūros metu maždaug kas minutę jausite vibraciją.

5. Tęskite procedūrą, vedžiodami prietaisą po odą. Po 20 minučių prietaisas automatiškai išsijungs.

Jeigu prietaisas sunkiai slysta, galite papildomai padengti elektrodus geliu.

Jeigu jaučiate skausmą ar diskomfortą, ištraukite prietaisą ir palaukite, kol jausitės gerai. Tada pakartokite procedūrą.

6. Ištraukite ir išvalykite prietaisą (žr. 10 skyrių „Valymas, priežiūra ir laikymas“).

9.4 Po procedūros

Po procedūros, naudojant vidinį arba išorinį režimą, rekomenduojame:

- 2 dienas po procedūros vengti labai karšto vandens.
- Susisiekti su gydytoju, jeigu pasireiškia infekcija, didelis patinimas, paraudimas, skausmas, kitų neįprastų simptomų.

10. Valymas, priežiūra ir laikymas

- Specialia makšties servetėle nuvalykite gelio likučius nuo prietaiso. Taip apsaugosite prietaisą nuo sugadinimo.
- Nusausinkite prietaisą švariu popieriniu rankšluosčiu.
- Nuvalius, rekomenduojame laikyti prietaisą grožio dėkle. Ant elektrodų (nr. 5, nr. 6) galite uždėti apsauginį dangtelį, tačiau tai nebūtina.
- Galite naudoti valymo skysčius, kurių sudėtyje yra iki 70 proc. alkoholio, tačiau niekada nenaudokite acetono, kitų abrazyvinių skysčių – jie gadina prietaisą.



Nemerkite prietaiso ir jo dalių į vandenį.

11. Problemų sprendimas

Nemodifikuokite, neardykite, neremontuokite prietaiso patys. Viduje yra pavojingų elektrinių komponentų, kurie kelia didelį susižalojimo pavojų. Tokiu atveju anuluojama garantija.

Problema	Paaškinimas/sprendimas
Mano prietaisas neįsijungia	<ul style="list-style-type: none">• Patikrinkite, ar prietaisas įkrautas. Išjunkite ir vėl įjunkite. Jeigu problema neišnyko, susisiekite su Klientų aptarnavimo centru.
Nejaučiu prietaiso skleidžiamos šilumos.	<ul style="list-style-type: none">• Šiluma neskleidžiama, jeigu elektrodai (nr. 5, nr. 6) nekontaktuoja su oda. Tai

	<p>apsauginė funkcija. Prieš pradėdami procedūrą, tvirtai prispauskite prietaisą prie odos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šiluma neskleidžiama, jeigu nepatėpėte geliu arba anksčiau teptas gelis išdžiūvo. Gelį tepkite prieš pat procedūrą.
Pakaitomis blyksi žalia ir balta režimo indikatorius (nr. 2) šviesa	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemos klaida. Paspauskite valdymo mygtuką (nr. 3), kad prietaisas persikrautų. <p>Jeigu problema neišnyko, susisieki su Klientų aptarnavimo centru.</p>
Prietaisas nesikrauna	<ul style="list-style-type: none"> • Patikrinkite, ar adapteris prijungtas prie prietaiso ir elektros tinklo. Ištraukite adapterį (nr. 9) ir dar kartą prijunkite prie prietaiso. • Patikrinkite, ar USB kabelis (nr. 8) nesugadintas. <p>Jeigu problema neišnyko, susisieki su Klientų aptarnavimo centru.</p>
Procedūros metu prietaisas nustojo veikęs	<ul style="list-style-type: none"> • Patikrinkite, ar prietaisas pilnai įkrautas. Prietaisas automatiškai išsijungia, jeigu baterijos įkrovos lygio nepakanka tęsti procedūrą, ir tuo atveju, jeigu pasireiškia sistemos klaida. <p>Jeigu tai sistemos klaida, susisieki su Klientų aptarnavimo centru.</p>
Prietaisas nebeveikia	<ul style="list-style-type: none"> • Paspauskite valdymo mygtuką, kad perkrautumėte prietaisą <p>Jeigu problema neišnyko, susisieki su Klientų aptarnavimo centru.</p>